

 <p>HONEY DREAM</p> <p>HONEY S.R.L. - Largo Giardino 7/A - 21052 Busto Arsizio (VA) – Cap. Soc. 10.000,00 Eur i.v. – P. IVA IT03402960128 - Rea VA-348645</p>	<p>SCHEDA TECNICA PRODOTTO</p>	<p>Codice articolo MTR</p>
		<p>Revisione: 6 del 09/06/2020</p>
<p>MASCHERINA FILTRANTE-GENERICA MTR</p>		

Descrizione

Il prodotto definito “mascherina filtrante-generica ad uso esclusivo della collettività” deve essere utilizzato unicamente per l’applicazione descritta.

La presente mascherina non è un Dispositivo Medico e non è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). Non garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa e non è utilizzabile quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o DPI (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro per proteggersi da rischi specifici).

Le mascherine filtranti-generiche sono realizzate ai sensi dell’art 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ad uso della collettività, come precauzione per la copertura di naso e bocca a fini igienico-ambientali e come presidio per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei casi previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e altri provvedimenti delle autorità (v. Protocollo di Regolamentazione definitivo approvato in data 24/04/2020 e art. 3, comma 3, DPCM approvato e pubblicato in data 26/04/2020).

Possono essere utilizzate con lo scopo di limitare lo scambio *droplet* (goccioline) tra le persone solo in aggiunta alle misure di prevenzione e protezione raccomandate, come la distanza interpersonale di sicurezza e l’igiene costante e accurata delle mani, e nel rispetto delle istruzioni d’uso

Caratteristiche

MASCHERINA A TRE STRATI, LAVABILE E RIUTILIZZABILE, NON STERILE CON TRATTAMENTO IDROFOBICO E ANTIBATTERICO

DIMENSIONI: 180mm x 90mm

STRATO ESTERNO cotone 100%

STRATO INTERMEDIO tessuto non tessuto in polipropilene 100% idrofobico

STRATO INTERNO cotone 100%

NON CONTIENE LATTICE


I tessuti in cotone e i prodotti utilizzati per il loro trattamento sono certificati e sicuri. In particolar modo il trattamento antimicrobico sul tessuto è effettuato con prodotti Oeko-tex Classe I (articoli per neonati e bambini piccoli fino a 3 anni) Nitrato di argento CAS 1336-21-6 e Zinco piritione CAS 134663-41-7) applicati per impregnazione. Questo trattamento protegge l’articolo dalla proliferazione batterica, conferendo freschezza di lunga durata e proprietà anti-odore.

 HONEY S.R.L. - Largo Giardino 7/A - 21052 Busto Arsizio (VA) – Cap. Soc. 10.000,00 Eur i.v. – P. IVA IT03402960128 - Rea VA-348645	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	Codice articolo MTR
		Revisione: 6 del 09/06/2020
MASCHERINA FILTRANTE-GENERICA MTR		

Realizzata ai fini dell'art. 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020. Non è un dispositivo medico né un DPI.

Come indossare la mascherina

1. Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di indossarla.
2. Assicurarsi che la mascherina sia integra (non devono esserci evidenti segni di usura o difettosità) e che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l'interno. Le pieghe devono essere rivolte verso il basso.
3. Indossare la mascherina prendendola dagli elastici evitando di toccare la superficie filtrante.
4. Fissare la mascherina con gli elastici dietro le orecchie e farla aderire bene al viso coprendo naso e bocca.
5. Evitare di toccare la mascherina una volta correttamente indossata.
6. Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica.

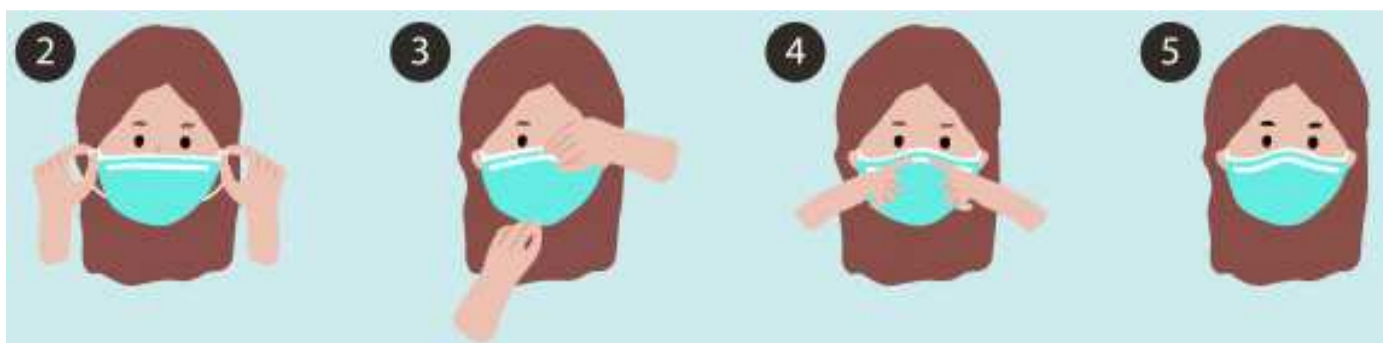

 <p>HONEY DREAM</p> <p>HONEY S.R.L. - Largo Giardino 7/A - 21052 Busto Arsizio (VA) - Cap. Soc. 10.000,00 Eur i.v. - P. IVA IT03402960128 - Rea VA-348645</p>	<p>SCHEDA TECNICA PRODOTTO</p>	<p>Codice articolo MTR</p>
		<p>Revisione: 6 del 09/06/2020</p>
<p>MASCHERINA FILTRANTE-GENERICA MTR</p>		

Come togliere la mascherina

1. Terminato l'utilizzo, lavarsi le mani e rimuovere la mascherina dal viso sganciando gli elastici e avendo cura di non farla aderire ad altre parti del viso/corpo. Non toccare con le mani la superficie filtrante della mascherina.
2. Se è previsto il riutilizzo, procedere con la sanificazione (lavaggio a mano o in lavatrice, vedi paragrafo specifico).
3. Se deve essere smaltita, la mascherina va gettata in un sacchetto chiuso secondo le norme vigenti.
4. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone e con un disinfettante a base alcolica.

Avvertenze

- La mascherina deve essere utilizzata unicamente per l'applicazione descritta. Un eventuale utilizzo improprio può essere pericoloso per la salute.
- Le mascherine non possono essere utilizzate come protezione nei confronti di gas e vapori, sostanze chimiche, biologiche e nucleari.
- L'ossigeno presente nell'aria ambiente non dovrà scendere al di sotto del 17 Vol.%, non utilizzare le mascherine in ambienti poco areati (miniere, fognie, pozzi, ecc.).
- Le mascherine non possono essere usate per operazioni mediche.
- Non modificare, danneggiare o alterare la mascherina.
- I soggetti affetti da disturbi respiratori (ad es. asma) oppure cardio-patologie sono tenuti a consultare il Medico.
- Le mascherine in soggetti sensibili possono procurare reazioni allergiche/irritazione. In caso di irritazione cessarne l'uso e consultare il Medico.
- Per motivi igienici le mascherine non possono essere indossate da più soggetti.
- Le mascherine non sono idonee all'utilizzo da parte di bambini.

Istruzioni per il lavaggio e la conservazione

Le mascherine sono state progettate per mantenere inalterate le proprietà antimicrobiche ed idrofobiche per un massimo di 20 lavaggi.

Lavare a mano o in lavatrice a massimo 40°C, non candeggiare, stirare massimo a 100°C, non lavare a secco.

Per la disinfezione è previsto l'utilizzo di presidi sanificanti o additivi di lavaggio depositati al Ministero della Salute.

 HONEY S.R.L. - Largo Giardino 7/A - 21052 Busto Arsizio (VA) – Cap. Soc. 10.000,00 Eur i.v. – P. IVA IT03402960128 - Rea VA-348645	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	Codice articolo MTR
		Revisione: 6 del 09/06/2020
MASCHERINA FILTRANTE-GENERICA MTR		



Le mascherine devono essere conservate nella confezione originale o equivalente (in materiale plastico esente da sostanze pericolose), che ne garantisca la protezione da umidità e polvere. Non deve essere esposta a fonti di calore ed irraggiamento solare.

Smaltimento

Smaltire le mascherine in sacchetti chiusi secondo le normative vigenti.